

GINHYAL

Vajinal jel

NEMLENDİRİCİ ve KAYGANLAŞTIRICI

Ginhyal Vajinal jel hiyalüronik asit bazlı, yüksek nemlendirme özelliklerine sahip, hormonal olmayan bir jeldir.

Özel formülasyonu vulvo vajinal kuruluğu ve buna bağlı rahatsızlığı giderir. Doğal sıklığı ve esnekliği geri kazandıran bir kayganlaştırıcı ve nemlendirici görevi görür.

Hiyalüronik asit, rahatsızlıkları gidermede önemli bir rol oynayan dokuların doğru hidrasyonunu sağlamaktan sorumlu moleküldür. Lipozomal fosfolipidik bileşen, jelin ince zar oluşturma ve koruyucu özelliklerini geliştirir ve uzun süreli bir etkinlik için vulvo-vajinal yoluyla hiyalüronik asidin kontrollü salınımını sağlar.

E vitamini, hiyalüronik asit ile doku esnekliğini artırarak ve vulvo-vajinal dokuların yaşlanma sürecini yavaşlatarak önemli bir rol oynar. Ginhyal - Vajinal jeli uygulamak kolaydır. Hoş, yağsız dokusu kullanım sırasında optimum konfor sağlar. Vücudun pH derecesine uygundur. Prezervatifle uyumludur.

Ginhyal Vajinal jel aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Nedeni ne olursa olsun vulvo-vajinal kuruluğun tedavisi (stres, menopoz)
- NEMLENDİRİCİ ETKİ

- Cinsel ilişki sırasındaki acı tedavisi (disparüni) – KAYGANLAŞTIRICI ETKİ

- Tahriş olmuş mukozanın tedavisi- cerrahi tedavi- İYİLEŞTİRİCİ ETKİ

KULLANIM KOŞULLARI

- **NEMLENDİRİCİ – İYİLEŞTİRİCİ AJAN:** Semptomlar gerileyinceye kadar haftada 2 veya 3 kez dahili olarak uygulayın. Gerekli takdirde küçük bir miktarı dışarıdan uygulamak mümkündür.

- **KAYGANLAŞTIRICI:** Cinsel ilişki sırasında veya hemen önce 1 kez uygulayın . Prezervatif ile uyumludur.

NASIL KULLANILIR

Kapağı çıkarın, koruyucu kağıtta bir delik oluşturmak için alt kısmını kullanın.

A. Aplikatörü tüpün açıklığına spiral olarak yerleştirin.


B. Bir doz jel almak için pistonu kilitlemeye kadar çekerken tüpü yavaşça sıkın. Aplikatörü tüpten çıkarın.

C. Aplikatörü mümkün olduğunca derinlemesine vajinaya yerleştirin. Yerleştirdiğinizde tüm jeli uygulamak için pistonu hafifçe baskı uygulayın. Gerekli takdirde jeli dış genital bölgeye uygulamak için parmak kullanılabilir.

D. Aşağıda gösterildiği gibi kullanımdan sonra tüpün uygun şekilde kapatıldığından ve aplikatörün temiz olduğundan emin olun:

Pistonu aplikatörden çıkarın

E. Ilık suyla temizleyin ve kurumaya bırakın

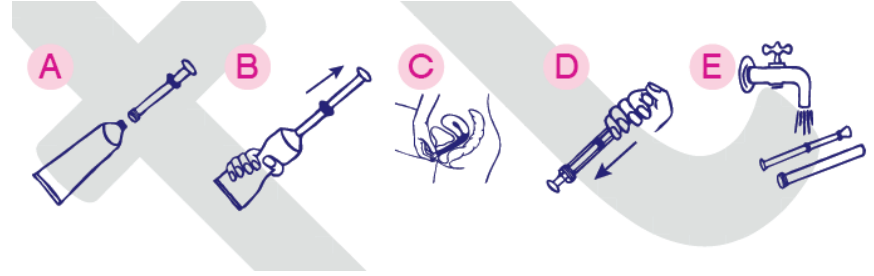

UYARILAR

Bir veya birden fazla bileşene aşırı duyarlılık olduğu bilinen durumlarda kullanmayın. Ginhyal vajinal jelin hamilelik veya emzirme sırasında veya diğer jinekolojik tedavilerle ilişkili olarak kullanımına ilişkin hiçbir veri mevcut değildir.

Rastgele kullanımdan kaçının. Gözlerle temastan kaçının. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Paket zarar görmüşse kullanmayın. Son kullanma tarihi geçtiği zaman kullanmayın. Kullanımdan sonra tüpü dikkatlice kapatın. Oda sıcaklığında saklayın.

YAN ETKİLER

Uygulama sırasında batma hissi veya yoğun ısı, zarar görmüş mukozayı etkileyebilir.

Bu durum ara sıra meydana gelebilir ve tersine döndürülebilir.

İÇİNDEKİLER

Hiyalüronik asit sodyum tuzu, fosfolipitler, E vitamini asetatı, jelleştirici ve stabilize edici ajanlar, gerektiği miktarda 100' e kadar artırılmış su, Prezervatifler.

Türkiye Distribütörü

Orthogen İlaç Sađ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Mah. 2124.Cad. No:22/1 Çankaya, Ankara

