

For arthritis

High HyalplusTM

Sodium Hyaluronate / prefilled



ENJEKSİYON

KULLANMA TALİMATI

HIGH HYAL PLUS Hyaluronik Asit/1 Enjeksiyon Eklem içi

• **İçerik:** Sodium hyaluronate, Sodium Chloride, Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Su

• **Ürün Kategorisi:** Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Cihaz Kurumu Onaylı /ÜTS kaydı
Medical Device / CE Belgeli

Kullanım Şekli

Sinoviyal sıvı yerine geçer ve dejeneratif veya travme sonrası oluşan patolojilerden kaynaklanan ağrı veya hareket kabiliyetinin azalmış olduğu durumlarda etkilenmiş olan eklemlere fizyolojik ve reolojik özelliklerini yeniden kazandırır.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu enjeksiyon kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Enjeksiyon hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.

HIGH HYALPLUS nedir ve ne için kullanılır?

High Hyalplus, 20mg sodyum hyaluronat içeren steril, şeffaf bir viskoelastik sıvıdır. İçeriği sebebi ile doğal bir şekilde eklem ve sinirlerin yumuşamasını sağlar. Osteoartrit tedavisi ve ağrısında kullanılır.

HIGH HYALPLUS ullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIGH HYALPLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da hamilelik ve emzirme dönemindeyseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Üç yaşın altındaki çocuklardan sakınınız.
- Kutu üzerindeki son kullanma tarihine dikkat ediniz.

Bu uyarılar geçmiştiki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Detaylı bilgi için:

www.orthogen.com.tr

Orthogen

HIGH HYALPLUS nasıl kullanılır

HIGH HYALPLUS daima doktorunuz tarafından kullanılır. Profesyonel sağlıkçılar haricinde kullanımı uygun değildir.

Uygulama yolu ve metodu

Tek kullanımlık steril enjeksiyon doktorunuz tarafından eklem içine uygulanır.

Olası yan etkiler nelerdir

Geçici ağrı veya enjekte edilen eklemün şişmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu reaksiyon genellikle bir kaç gün içerisinde azalır. Bu reaksiyonlardan sonra tedaviden klinik yarar devam eder.

HIGH HYALPLUS'ın saklanması

HIGH HYALPLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HIGH HYALPLUS'ı kullanmayınız.

0°C ve 40°C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Üretici Firma: Humedix Co, Ltd.

Menşe Ülke: Güney Kore

Raf Ömrü

24 Ay

Ruhsat Sahibi:

Orthogen İlaç Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Mah. 2124.Cad. No:22/1

Gökçen Park Plaza Çankaya/Ankara

Tel: 0312 219 77 82

www.orthogen.com.tr

info@orthogen.com.tr



TEK KULLANIMLIK TIBBİ CİHAZ



KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUN



0°C VE 40°C ARASINDA SICAKLIKTA MUHAFAZA EDİN.



DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞI VE ISI KAYNAKLARINA MARUZ KALMAKTAN KAÇININ



AŞIRI NEM VE SU İLE TEMASDAN KAÇININ



UYARI



ÜRETİCİ FİRMA



PARTİ NUMARASI



SON KULLANMA TARİHİ